

## THERMACARE PARA O PESCOÇO, OMBROS E PUNHOS

### Finalidade pretendida:

Alívio eficaz e direcionado de dores musculares e/ou articulares associadas a:

- esforço excessivo
- distensões e entorses
- artrite
- tensão muscular

Adequado para quem sofre de dor aguda, crónica e ocasional.

### Advertências e precauções especiais de utilização.

Este produto pode causar queimaduras/bolhas. Verifique periodicamente a pele durante a utilização. Se observar irritação ou queimaduras, remova imediatamente o produto. **Para utilizadores que não sejam autossuficientes ou para utilizadores entre 12-18 anos:** é necessária supervisão por um cuidador. **55 anos ou mais:** O risco de ocorrência de queimaduras aumenta com a idade. Se tiver 55 anos ou mais, use ThermaCare sobre uma camada de roupa ou uma toalha, e não o use enquanto dorme. Consulte o médico ou farmacêutico antes de utilizar o produto, se tiver diabetes, má circulação, doença cardíaca, artrite reumatoide ou se estiver grávida.

Interrompa a utilização e consulte um médico se no local de aplicação da faixa sentir algum desconforto, ardor, inchaço, eritema ou outras alterações persistentes na pele e se, após 7 dias de utilização, a dor persistir ou se agravar.

Cada célula térmica contém ferro (cerca de 2 gramas):

- Se ingerido, consulte imediatamente o médico.
- Se entrar em contacto com a pele ou com os olhos, remova a faixa, lave a área afetada com água e consulte imediatamente o médico.
- Se a faixa ficar danificada ou rasgada durante a utilização, remova-a. Manter fora do alcance das crianças e de animais domésticos.

Nunca aqueça o produto no micro-ondas nem tente voltar a aquecê-lo por outros meios, pois a faixa poderá incendiar-se.

### Advertências e precauções especiais de utilização.

#### Não utilizar:

- Se as células térmicas apresentarem perdas de conteúdo e/ou a faixa estiver danificada ou rasgada ou se a saqueta estiver danificada
- Com preparações de uso tópico
- Em pele pouco saudável, lesionada ou gretada
- Em zonas com nódos negros ou inchaço, que tenham ocorrido nas últimas 48 horas
- Em pessoas incapazes de seguir todas as instruções de utilização ou incapazes de remover o produto
- Com outras formas de calor
- Abaixo dos 12 anos de idade
- Na face/cabeça, mamas, dedos, virilhas, pés ou dedos dos pés, na parte de trás do joelho ou na parte interna do braço ou axila, ou na parte inferior do abdómen.

**Ao utilizar este produto:** Não use durante mais de 8 horas ao longo de um período de 24 horas. **Não aperte demasiado a faixa nem sobreponha as células térmicas.**

Não exerça uma pressão adicional sobre o produto (por exemplo: não se apoie em superfícies duras nem use sob vestuário apertado). Se sentir a faixa demasiado quente, interrompa a utilização ou coloque-a por cima de uma camada de roupa e não diretamente em contacto com a sua pele. Para evitar um risco acrescido de queimaduras, remova o produto antes de ser submetido a exames de Imagiologia de Ressonância Magnética. Mantenha a faixa seca. **Consulte a secção Instruções de utilização.**

### Fabricante

Angelini Pharma Inc.